

Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna
Tel. +46 8 562 44 500

GONAL-f[®]
FOLLITROPIN ALFA

MERCK



INSTRUKTION TILL DIG
SOM SKA ANVÄNDA
GONAL-f®
Förfylld injektionpenna





NÅGRA PUNKTER INNAN DU KOMMER IGÅNG MED GONAL-f[®] FÖRFYLLED INJEKTIONSPENNA



Denna broschyr är en steg-för-steg guide till dig som har ordinerats
GONAL-f[®] förfylld injektionspenna av din läkare.


GONAL-f[®] är ett läkemedel som används vid fertilitetsbehandling. Den innehåller
substansen follitropin alfa och finns som injektionslösning i förfylld penna.

Före injektion, läs alltid bruksanvisningen noggrant. Läs även bipacksedeln i
förpackningen eller på www.fass.se

Om du har några frågor om GONAL-f[®] förfylld injektionspenna, kontakta läkare eller
annan personal på kliniken.

GONAL-F® FÖRFYLLED INJEKTIONSPENNA

Översikt över din injektionspenna

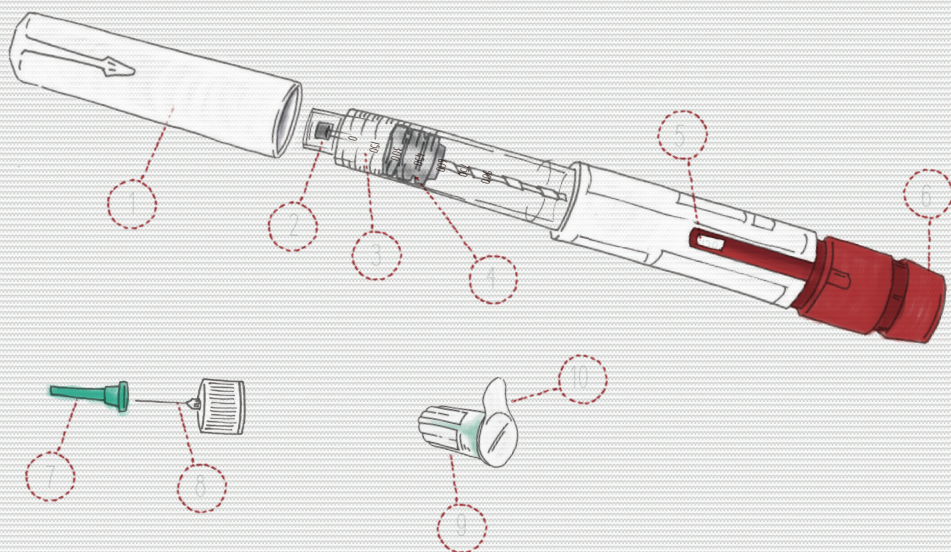


1. Skyddshylsa
2. Gängad nålanslutning
3. Läkemedelsbehållare
4. Kolv

5. Dosisdisplay
6. Dosisinställningsknapp
9. Yttre nålskydd
10. Avdragbar förslutning


STEP
1

SÄTT PÅ NALEN

FÖRBERED DIN PENNA

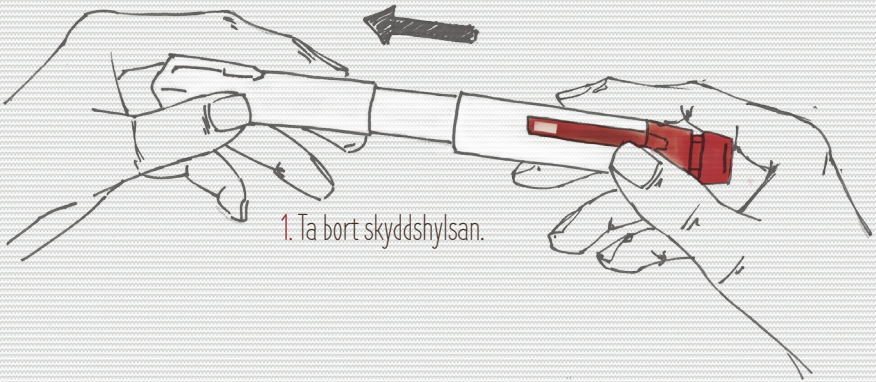


1. Ta bort skyddshylsan.

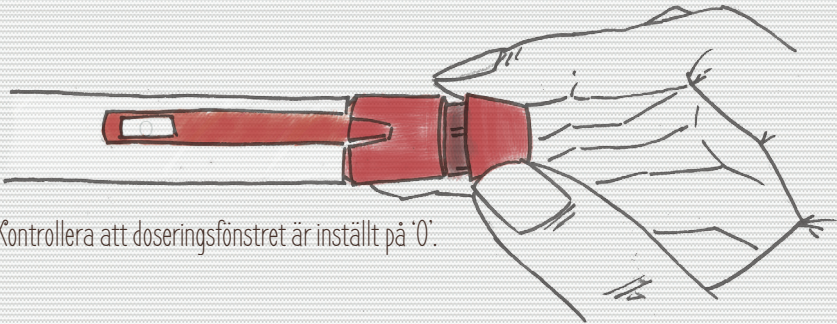


2. Kontrollera att doseringsfönstret är inställt på '0'.

FÖRBERED NÄLEN

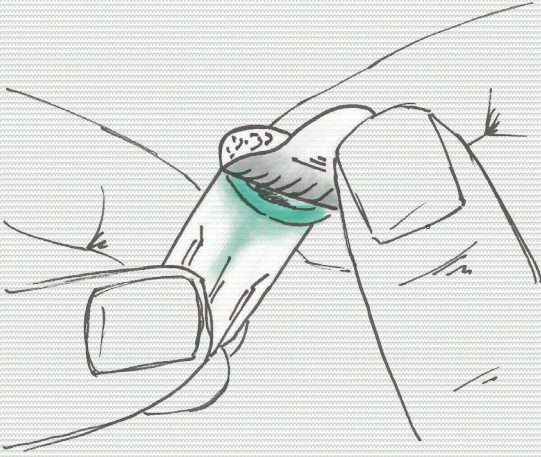


3. Tag bort skyddspappret från yttre nålskyddet.

SÄTT PÅ NÄLEN

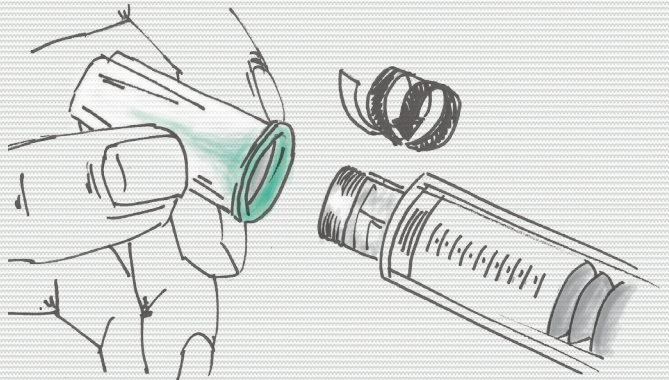

4. Skruva fast den gängade spetsen på injektionspennan på det yttre nålskyddet tills du känner ett lätt motstånd.

TA BORT DET YTTRE NÅLSKYDDET

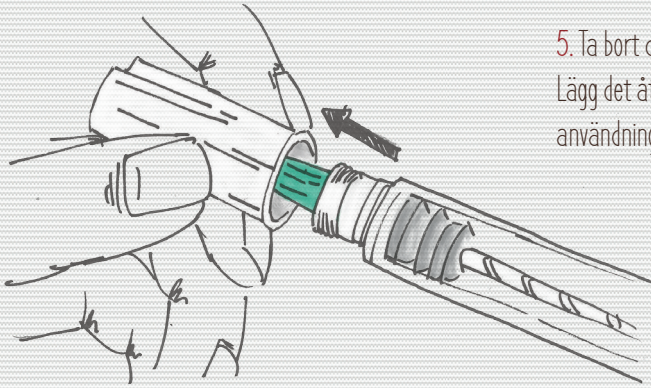

5. Ta bort det yttre nålskyddet.
Lägg det åt sidan för senare
användning.




6. Håll pennan med nålen pekande uppåt. Ta försiktigt bort det gröna inre skyddet och kasta det.




STEP
2

STÄLL IN DOSEN

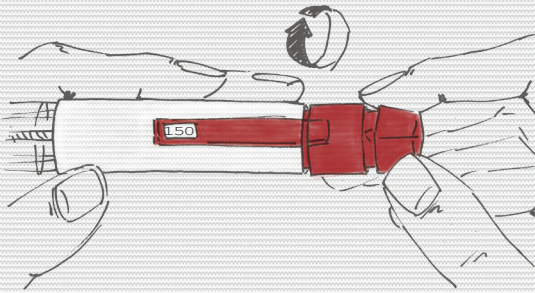

1. Vrid dosinställningsknappen framåt tills din ordinerade dos visas i doseringsfönstret.

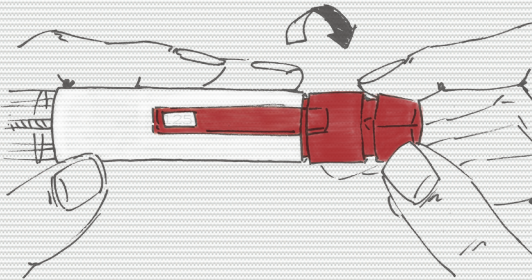

2. Om du ställt in för hög dos, vrid du tillbaka dosinställningsknappen till rätt dos.


KONTROLLERA ATT DOSEN DU STÄLLT IN ÖVERENSTÄMMER MED DEN DOS DIN LÄKARE HAR ORDINERAT

STEP
3

INJICERA DOSEN



Välj injektionsställe enligt instruktion från din läkare eller sjuksköterska

1. Stick in nålen långsamt i huden.

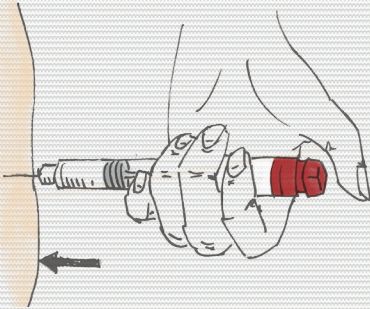


2. Tryck sedan in dosknappen så långt det går. Håll dosknappen intryckt minst 5 sekunder för att säkerställa att du injicerat hela dosen.

Den dossiffran som visas i doseringsfönstret återgår till 0.

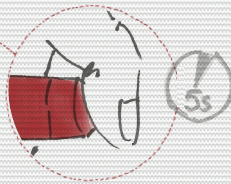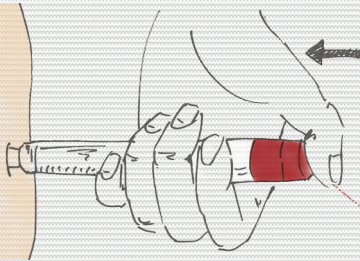


3. Dra ut nålen samtidigt som du håller dosinställningsknappen intryckt.

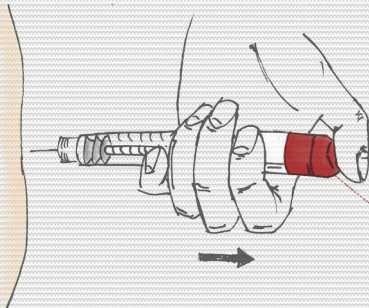


EFTER INJEKTIONEN

KONTROLLERA ATT DU GIVIT EN FULLSTÄNDIG INJEKTION

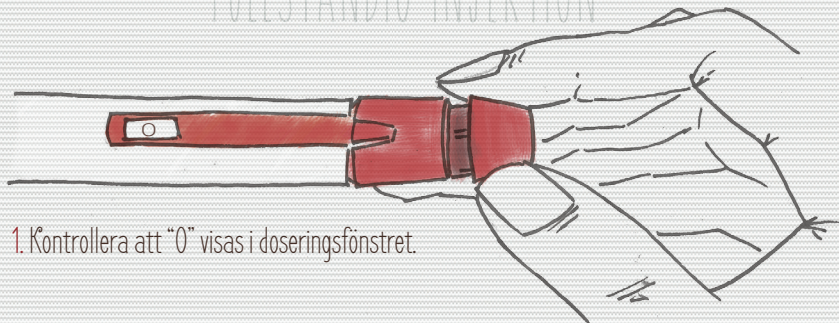


1. Kontrollera att "0" visas i doseringsfönstret.

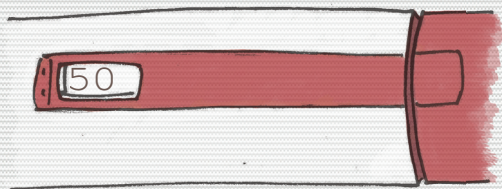

2. Om en siffra som är högre än 0 visas i doseringsfönstret är injektionspennan tom och du har inte fått den fullständiga ordinerade dosen.

Den mängd som saknas och som du måste injicera med en ny injektionspenna visas i doseringsfönstret.


AVSLUTA EN DELINJEKTION (BARA VID BEHOV)

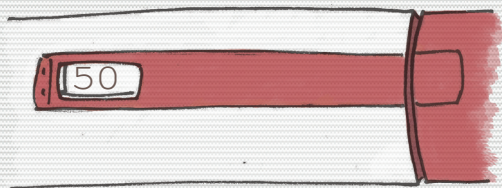


Upprepa steg 1 för att förbereda din nya injektionspenna. Ställ sedan in dosen på den mängd som saknas på den nya injektionspennan och injicera.

TA BORT NÄLEN


NÄLEN MÅSTE TAS BORT EFTER VARJE INJEKTION

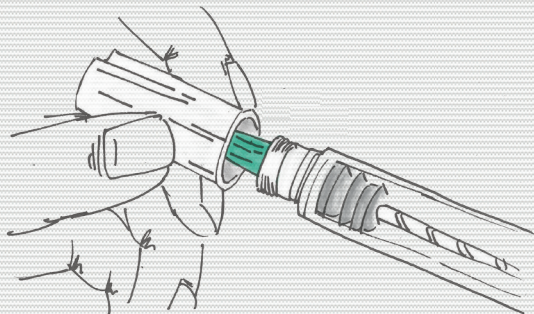

1. Sätt tillbaka det yttre nålskyddet

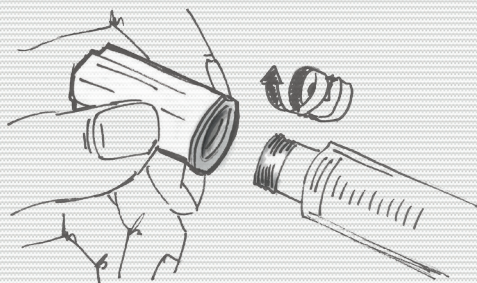

2. Skruva av nålen genom att vrida nålskyddet motsols.

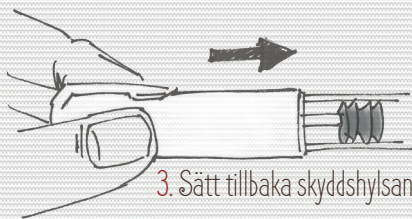

3. Sätt tillbaka skyddshylsan

FÖRVARING

KYLSKÅP
2-8°C



<25°C

Förvara alltid GONAL-f[®] förfylld injektionspenna med skyddshylsan på. Obruten förpackning förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Efter öppnandet kan GONAL-f[®] förvaras i maximalt 28 dagar vid högst 25°C. Anteckna gärna första användningsdatum på den förfyllda injektionspennan.

Innan förpackningen öppnas och inom hållbarhetstiden, kan läkemedlet tas ut från kylskåpet och förvaras i tre månader vid högst 25°C utan att förvaras i kylskåp igen.

GONAL-f[®] måste kasseras om den inte har använts inom tre månader.